

Brizzy

con Oxímetro

Folleto del paciente



Este folleto está diseñado para asistir al paciente. Para obtener información sobre las limitaciones, contraindicaciones, precauciones y advertencias relacionadas con Brizzy, por favor consulte a su médico.

Aquí puede ver el video con las instrucciones:




Brizzy es un monitor de sueño portátil muy fácil de usar. Puede instalar el dispositivo usted mismo siguiendo estas instrucciones.




Instalación del sensor Jawac

Coloque cada una de las sondas en el soporte adhesivo NS910 (JawaGrip) y fíjelas con el velcro.

1. Fije la sonda envolviéndola con los velcros.

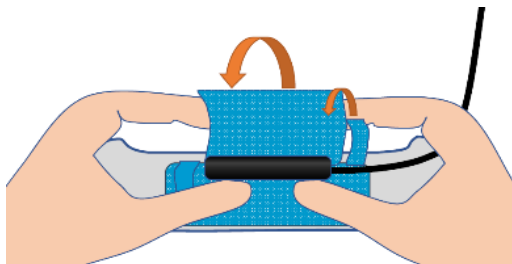

2. Sujete el cable utilizando una de las tiras laterales del velcro.

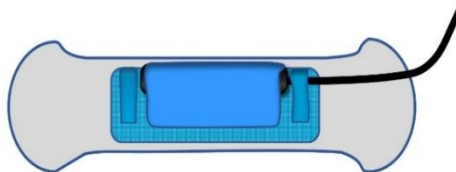


Coloque la sonda horizontalmente en la frente y en la barbilla según las siguientes instrucciones:

Ambas sondas deben estar en el mismo eje vertical y el cable debe colocarse en el mismo lado.

Asegúrese de que las sondas estén bien fijadas a la cara y que no puedan moverse o caerse.

Asegúrese de que los cables pasen por detrás de la misma oreja y ajústelos deslizando el tubo sobre los cables.

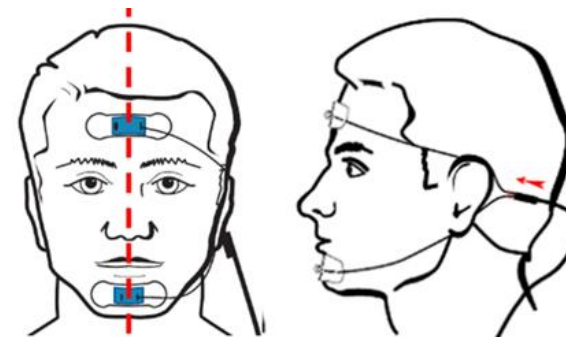

Instalación del sensor de oximetría


Coloque el sensor de pulso en el dedo índice tal y como se describe en las instrucciones de uso (en función del tipo de sensor utilizado).



Cuando el oxímetro está conectado, una luz roja ilumina la punta del dedo.
¡No use esmalte de uñas en ese dedo!

Instalación del dispositivo

Pase el cinturón abdominal por las ranuras del dispositivo. Instale el dispositivo en el vientre (sobre una camiseta o un pijama) ajustando el cinturón cómodamente.

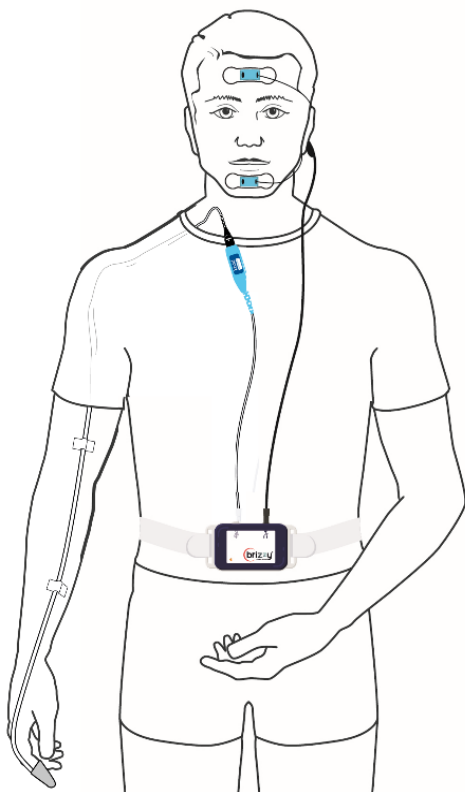

Conexión de los sensores

Asegúrese de alinear la ranura del conector del sensor con el reborde de la entrada del dispositivo antes de insertarlo. No lo fuerce.

A continuación, se muestran todos los pictogramas correspondientes a cada uno de los sensores:



Conecte el sensor de oximetría a la entrada blanca del dispositivo, ilustrada por este pictograma.



Conecte el sensor Jawac a la entrada negra del dispositivo, ilustrada por este pictograma.

La luz verde parpadea regularmente para indicar que la grabación está en curso.

No desconecte el sensor mientras se esté realizando una grabación.

Por la mañana, al despertar

Dependiendo de la configuración, el registro se detiene al desconectar el sensor de caída mandibular o a la hora programada.

Desconecte los sensores del dispositivo uno por uno:

- Desconecte el conector negro del sensor de distancia (Jawac) y libere las sondas.
 - Despegue con cuidado el velcro para retirar las sondas sin tirar de los cables.
 - Retire el adhesivo de la cara.
- Desconecte el sensor auxiliar y el oxímetro.
- Lleve de vuelta el equipo a su médico.



Nomics

Rue des Chasseurs
Ardennais 4

4031 Angleur (Bélgica)
support@nomicscare.com



2797