

Brizzy

met Oxymeter

Patiëntenbijsluiter



Deze bijsluiter is bedoeld om de patiënt te helpen. Voor informatie over de beperkingen, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen met betrekking tot Brizzy, raadpleeg uw arts.

U kunt de video-instructies hier bekijken:




Brizzy is een gebruiksvriendelijke draagbare slaapmonitor. U kunt het toestel gemakkelijk zelf installeren door de hier gegeven instructies te volgen.




Installatie van de Jawac sensor

Plaats elk van de 2 sondes op het velcrostuk van een JawaGrip (NS910) en bevestig ze als volgt:

1. Sluit de velcro rondom de sondes.

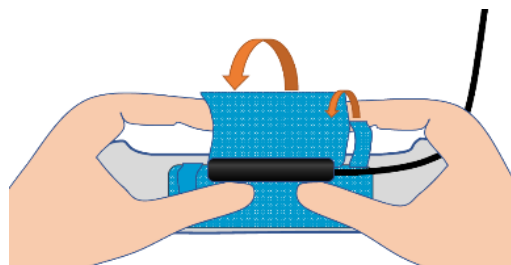

2. Gebruik één kant van de kleine klittenband om de kabel vast te maken.

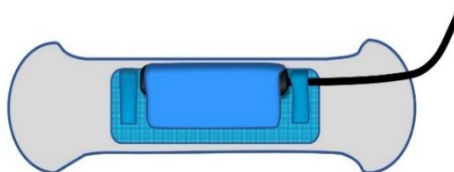


Bevestig het geheel horizontaal op het voorhoofd en de kin volgens de volgende instructies:

Beide sondes komen op dezelfde verticale as te staan en de kabels moeten aan dezelfde kant komen.

Zorg ervoor dat de sondes goed vastzitten aan uw gezicht en niet kunnen bewegen of draaien.

Leid beide kabels achter hetzelfde oor en stel ze af door het slangetje rond de kabels aan te trekken.

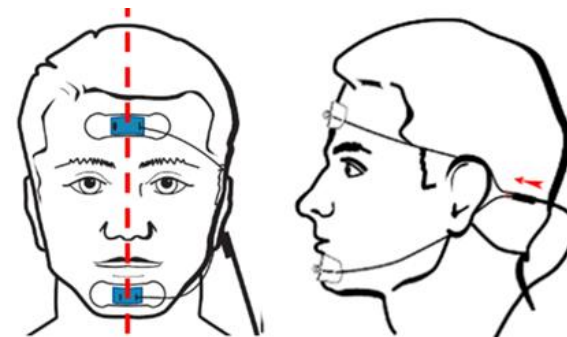

Installatie van de oximetrie-sensor

Volg de gebruiksaanwijzing van de sensor om deze aan de vinger te bevestigen (afhankelijk van het type sensor dat wordt gebruikt).




Wanneer de oximeter is aangesloten, verlicht een rood licht uw vingertop.

Let erop dat u geen nagellak op deze vinger heeft!

Installatie van het toestel

Haal de riem met klittenband door de sleuven in het toestel.

Plaats het toestel op uw buik (over een T-shirt of pyjama heen).

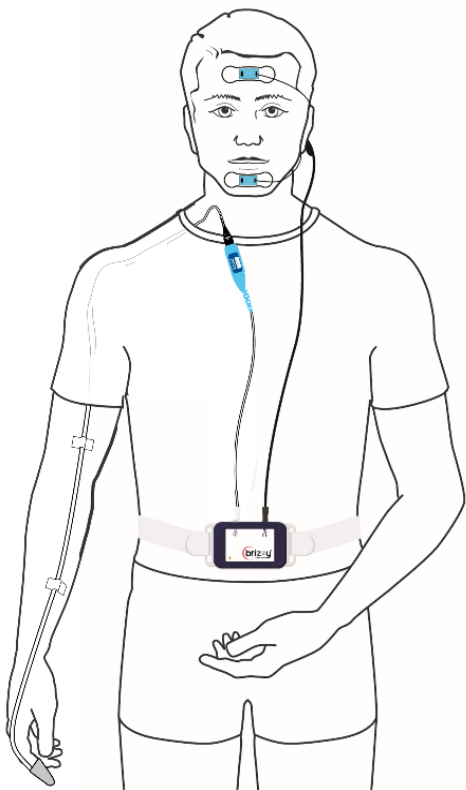

Sensoren aansluiting

Zorg ervoor dat u de inkeping in de connector van de sensor mooi overeenstemt met die van de aansluiting voordat u deze indrukt. Niet forceren.

Bekijk de onderstaande pictogrammen voor elk van de sensoren.



Sluit de oximetrie-sensor aan op de witte aansluiting van het toestel, afgebeeld door het pictogram hiernaast.



Sluit de Jawac-sensor aan op de zwarte aansluiting van het toestel, die is afgebeeld met het pictogram hiernaast.

Het groene lampje knippert regelmatig om aan te geven dat de opname bezig is.

Koppel de sensor niet los gedurende de opname.

In de ochtend, bij wakker worden

Afhankelijk van de configuratie stopt de opname bij het loskoppelen van de onderkaakbewegingssensor, of op een gepland tijdstip.

Koppel de sensoren één voor één los van het apparaat:

- Koppel de zwarte afstandssensor (Jawac) los en maak de sondes los.
 - Maak de klittenband voorzichtig los om de sondes te verwijderen, zonder aan de kabels te trekken.
 - Verwijder de plakkers van uw gezicht.
- Maak de hulpsensor en de oximeter los.
- Breng de apparatuur terug naar uw arts.



Nomics
Rue des Chasseurs
Ardennais 4
4031 Angleur (België)
support@nomicscare.com

