

Brizzy

Folleto del paciente



Este folleto está diseñado para asistir al paciente. Para obtener información sobre las limitaciones, contraindicaciones, precauciones y advertencias relacionadas con Brizzy, por favor consulte a su médico.

Aquí puede ver el video con las instrucciones:



Brizzy es un monitor de sueño portátil muy fácil de usar. Puede instalar el dispositivo usted mismo siguiendo estas instrucciones.


Instalación del sensor Jawac

Coloque cada una de las dos sondas en el soporte adhesivo NS910 (JawaGrip) y fíjelas con el velcro.

1. Fije la sonda envolviéndola con los velcros.




2. Sujete el cable utilizando una de las tiras laterales del velcro.

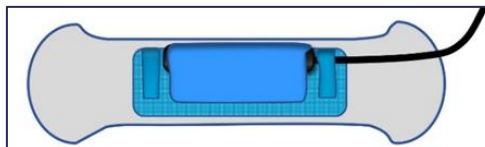


Ambas sondas deben estar en el mismo eje vertical y el cable debe colocarse en el mismo lado.

Asegúrese de que las sondas estén bien fijadas a la cara y no puedan moverse o caerse.

Asegúrese de que los cables pasen por detrás de la misma oreja y ajústelos deslizándolos sobre los cables.

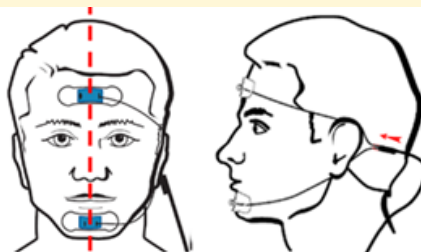


Instalación del dispositivo

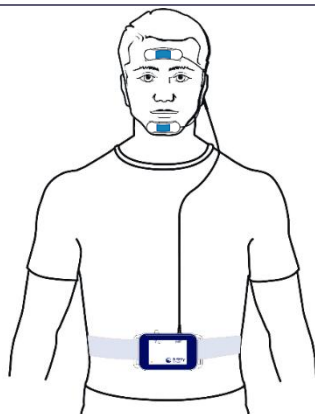

Pase el cinturón abdominal por las ranuras del dispositivo. Instale el dispositivo en el vientre (sobre una camiseta o un pijama) ajustando el cinturón cómodamente.

Iniciar

Conecte el sensor de distancia a la entrada negra del dispositivo, el que lleva la inscripción "JAWAC"

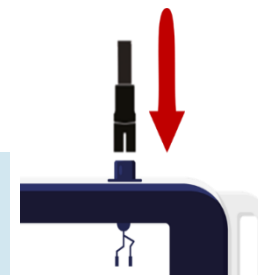

Asegúrese de alinear la ranura del conector del sensor con el reborde de la entrada del dispositivo antes de insertarlo.

El aparato se enciende al conectarle el sensor de distancia. El indicador luminoso verde parpadea cuando la grabación está en curso.

Por la mañana, al despertarse

Desconecte el conector negro del sensor de distancia (Jawac) y libere las sondas.

- Despegue con cuidado el velcro para retirar las sondas sin tirar de los cables.
- Retire el adhesivo de la cara.

Lleve de vuelta el dispositivo a su médico.



Nomics
Rue des Chasseurs
Ardennais 4
4031 Angleur (Bélgica)
support@nomicscare.com

