

Brizzy

Notice Patient



Cette notice est destinée à aider le patient. Pour obtenir des informations sur les limitations, les contre-indications, les précautions et les avertissements liés au Brizzy, veuillez consulter votre médecin.

Vous pouvez regarder les instructions en vidéo ici :



BRIZZY est un enregistreur portable du sommeil simple d'utilisation. Vous pouvez aisément mettre l'appareil en place vous-même en respectant les consignes suivantes :


Mise en place du capteur « Jawac »

Placez chacune des 2 sondes sur le velcro d'un adhésif NS910 (JawaGrip) et fixez les sondes à l'aide du velcro :

1. Fixez la sonde en refermant les velcros.




2. Utilisez une des parties latérales des velcros pour immobiliser le câble.

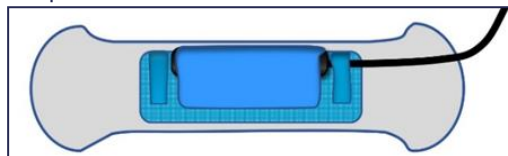


Les 2 sondes doivent être dans le même axe vertical et les câbles dirigés du même côté.

Vérifiez que les sondes sont bien collées sur le visage et qu'elles ne peuvent pas bouger ni pivoter.

Veillez à bien positionner les fils de manière à ce qu'ils repassent derrière la même oreille et ajustez-les en resserrant la tubulure prévue autour des câbles.

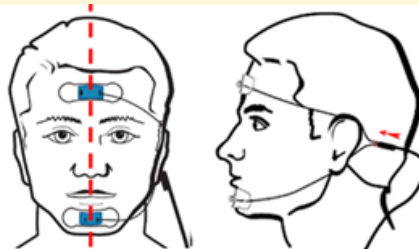


Mise en place de l'enregistreur

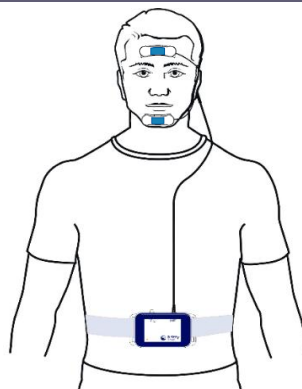

Faites passer la ceinture abdominale dans les fentes de l'appareil. Installez l'appareil sur le ventre (par-dessus un T-shirt ou une chemise de pyjama) en ajustant la ceinture confortablement.

Démarrage

Branchez le connecteur noir du capteur sur le connecteur noir de l'appareil, celui désigné par l'inscription "JAWAC".

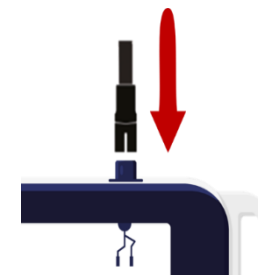

Alignez bien l'encoche du connecteur capteur avec la crête sur le connecteur de l'appareil avant d'enfoncer.

L'appareil se met en marche dès que l'on y branche le capteur de distance. Le témoin lumineux vert clignote lorsque l'enregistrement est en cours.

Le matin au réveil

Débranchez le connecteur du capteur noir « Jawac » et libérez les sondes :

- Détachez délicatement le velcro pour retirer les sondes sans tirer sur les câbles.
- Retirez les adhésifs du visage.

Rapportez l'équipement à votre médecin.



Nomics

Rue des Chasseurs
Ardennais 4

4031 Angleur (Belgique)
support@nomiscare.com



2797