

Brizzy

Patiëntenbijsluiters



Deze bijsluiters zijn bedoeld om de patiënt te helpen. Voor informatie over de beperkingen, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen met betrekking tot Brizzy, raadpleeg uw arts.

U kunt de video-instructies hier bekijken:



BRIZZY is een gebruiksvriendelijke en draagbare slaapmonitor. U kunt het toestel gemakkelijk zelf installeren door de hier gegeven instructies te volgen.


Installatie van de Jawac sensor

Plaats elk van de 2 sondes op het velcrostuk van een JawaGrip (NS910) en bevestig ze als volgt:

1. Sluit de velcro rondom de sondes.




2. Gebruik één kant van de kleine klittenband om de kabel vast te maken.

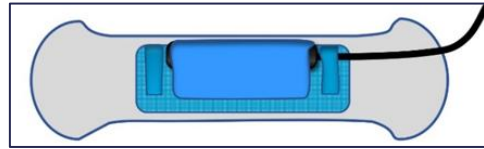


Beide sondes komen op dezelfde verticale as te staan en de kabels moeten aan dezelfde kant komen. Zorg ervoor dat de sondes goed vastzitten aan uw gezicht en niet kunnen bewegen of draaien.

Leid beide kabels achter hetzelfde oor en stel ze af door de slang rond de kabels aan te spannen.

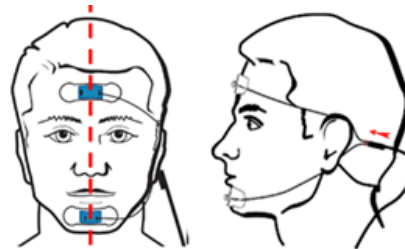


Installatie van het toestel

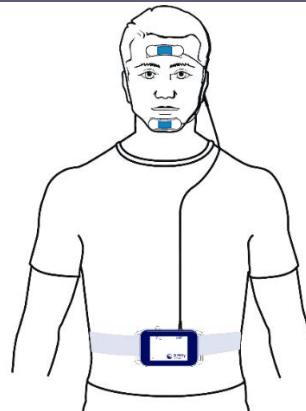

Plaats de buikriem in de sleuven van het toestel. Installeer het toestel op de buik (over een T-shirt of een pyjama heen) door de riem stevig maar comfortabel vast te maken.

Starten

Plug de zwarte sensor in de zwarte aansluiting van het toestel, degene aangeduid met "JAWAC".

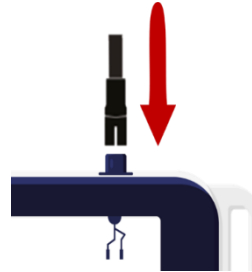

Zorg ervoor dat de inkeping in de connector mooi overeenstemt met die van de aansluiting.

Het toestel schakelt aan wanneer de sensoren erop worden aangesloten. Een groen indicatielampje begint te knipperen terwijl de opname bezig is.

In de ochtend, bij het wakker worden

Koppel de sensor van de zwarte connector (Jawac) los en maak de sondes los.

- Maak de klittenband voorzichtig los om de sondes te verwijderen zonder aan de kabels te trekken.
- Verwijder de plakkers van het gezicht.

Bezorg het toestel terug bij uw arts.



Nomics
Rue des Chasseurs
Ardennais 4
4031 Angleur (België)
support@nomicscare.com

