

Brizzy+

Notice Patient




Cette notice est destinée à aider le patient. Pour obtenir des informations sur les limitations, les contre-indications, les précautions et les avertissements liés au Brizzy+, veuillez consulter votre médecin.

Vous pouvez regarder les instructions en vidéo ici :




Brizzy+ est un enregistreur portable du sommeil simple d'utilisation. Vous pouvez aisément mettre l'appareil en place vous-même en respectant les consignes suivantes.

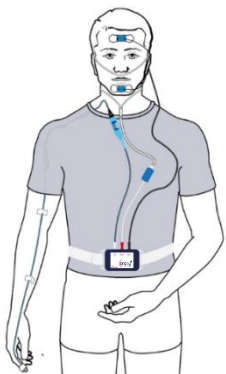


Mise en place du Jawac

Placez chacune des 2 sondes sur le velcro d'un adhésif NS910 (JawaGrip) et fixer les sondes à l'aide du velcro :

1. Fixez la sonde en refermant les velcros.

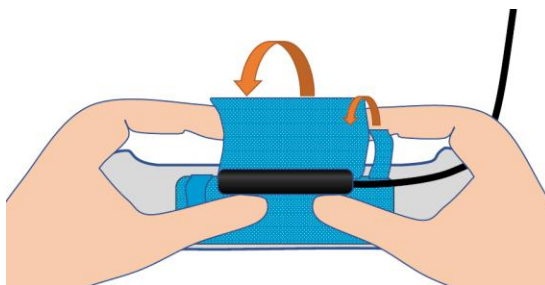

2. Utilisez une des parties latérales des velcros pour immobiliser le câble.

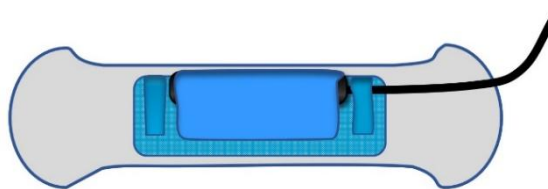


Collez les adhésifs horizontalement sur le front et le menton selon les consignes suivantes :


Les 2 sondes doivent être dans le même axe vertical et les câbles dirigés du même côté.

Vérifiez que les sondes sont bien collées sur le visage et qu'elles ne peuvent pas bouger ni pivoter.

Veillez à bien positionner les fils de manière à ce qu'ils repassent derrière la même oreille. Ajustez les fils derrière l'oreille en resserrant la tubulure prévue autour des câbles.

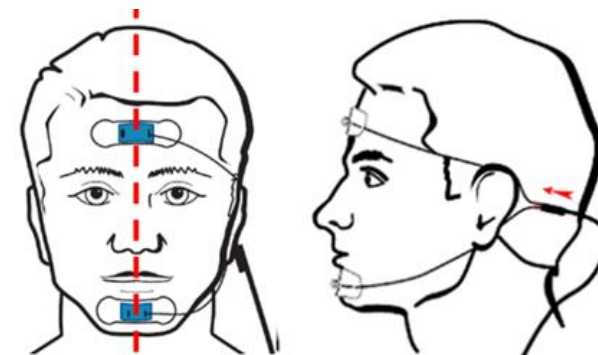

Mise en place des canules nasales

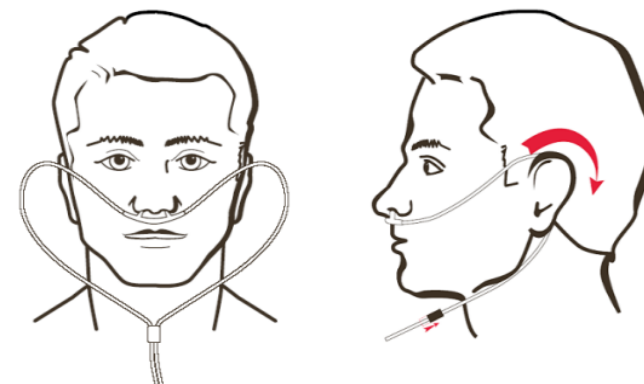

Insérez les deux petits embouts de la canule nasale dans les narines.

Faites courir la tubulure de la canule par-dessus les oreilles et sous le menton.


Glissez la tubulure de serrage vers le cou pour que l'ensemble tienne confortablement et fixez la canule en position si nécessaire à l'aide de sparadrap.

Si nécessaire, utilisez du sparadrap pour fixer la canule sur le visage, les embouts doivent rester toute la nuit dans les narines.

Mise en place du capteur de flux

Vissez la canule au capteur de flux (NS962).

Branchez le connecteur rouge du capteur de flux au connecteur rouge du Brizzy+ marqué du symbole 

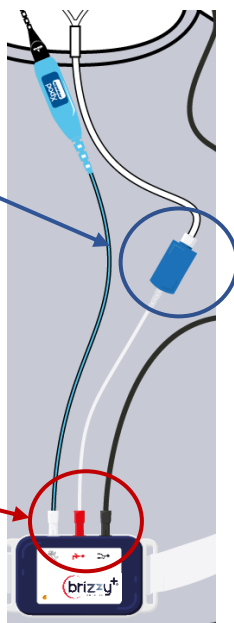

Mise en place de l'oxymètre

Fixez le capteur de pouls à l'index comme indiqué dans la notice d'utilisation (selon le type de capteur utilisé).



En fonctionnement, l'oxymètre émet une lumière rouge.

Pas de vernis à ongle coloré sur ce doigt !

Mise en place de l'enregistreur

Faites passer la ceinture velcro dans les fentes de l'appareil. Installez l'appareil sur le ventre (par-dessus un T-shirt ou une chemise de pyjama).

Branchement des capteurs

Alignez bien l'encoche du connecteur des capteurs avec la crête sur le connecteur de l'appareil avant d'enfoncer. Ne pas forcer.

Respecter les pictogrammes ci-dessous pour chacun des capteurs :



Branchez le module d'oxymétrie au connecteur blanc illustré par le pictogramme ci-contre.



Branchez le connecteur noir du capteur Jawac sur le connecteur noir de l'appareil, illustré par le pictogramme ci-contre.



Le connecteur rouge permet le branchement d'un capteur de flux (voir instructions ci-contre) ou d'un autre capteur auxiliaire (dans ce cas, référez-vous à la notice du capteur pour l'installation).

Le témoin lumineux vert clignote lorsque l'enregistrement est en cours.

Ne pas débrancher les capteurs pendant toute la durée de l'enregistrement.

Le matin, au réveil

Suivant la configuration de l'appareil, l'enregistrement s'arrête au débranchement du capteur d'abaissement mandibulaire ou à une heure programmée.

Débranchez les capteurs de l'appareil un à un :

- Débranchez le connecteur du capteur noir de distance (Jawac) et libérez les sondes :
 - Détachez délicatement le velcro pour retirer les sondes sans tirer sur les câbles.
 - Retirez les adhésifs du visage.
- Dévissez le connecteur de la canule nasale.
- Débranchez le capteur auxiliaire et l'oxymètre.
- Rapportez l'équipement à votre médecin.



Nomics
Rue des Chasseurs
Ardennais 4
4031 Angleur (Belgique)
support@nomicscare.com

