

Somnolter

Folleto del paciente




Este folleto está diseñado para asistir al paciente. Para obtener información sobre las limitaciones, contraindicaciones, precauciones y advertencias relacionadas con Somnolter, por favor consulte a su médico.

Aquí puede ver el video con las instrucciones:




SOMNOLTER es un monitor de sueño portátil muy fácil de usar. Puede instalar el dispositivo usted mismo siguiendo estas instrucciones.

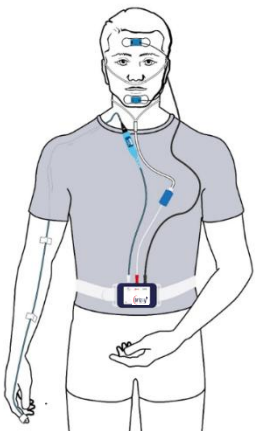


Instalación del sensor Jawac

Coloque cada una de las sondas en el soporte adhesivo NS910 (JawaGrip) y fíjelas con el velcro:

1. Fije la sonda envolviéndola con los velcros.

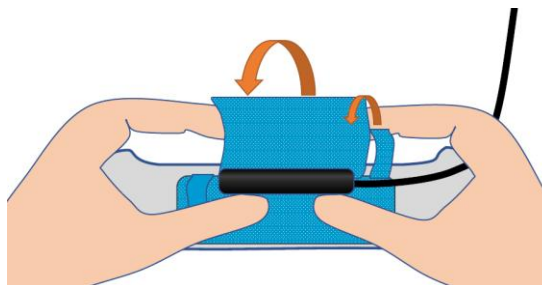

2. Sujete el cable utilizando una de las tiras laterales del velcro.

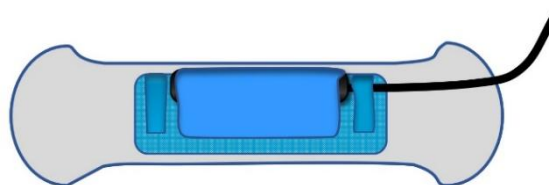


Coloque la sonda horizontalmente en la frente y en la barbilla según las siguientes instrucciones:

Ambas sondas deben estar en el mismo eje vertical y el cable debe colocarse en el mismo lado.

Asegúrese de que las sondas estén bien fijadas a la cara y no pueden moverse o caerse.


Asegúrese de que los cables pasen por detrás de la misma oreja y ajústelos deslizando el tubo sobre los cables.

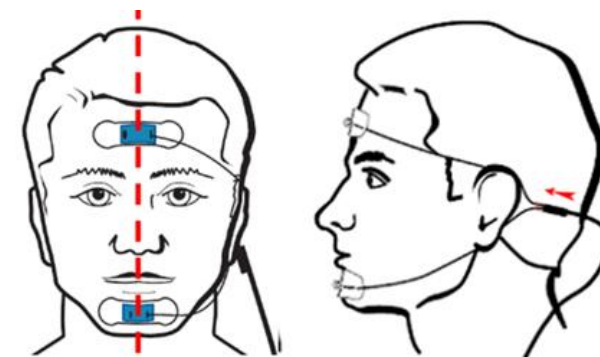

Instalación de las bandas inductivas


Conecte el cable azul al cinturón superior del pecho.

Conecte el cable amarillo al cinturón inferior, cerca del dispositivo.

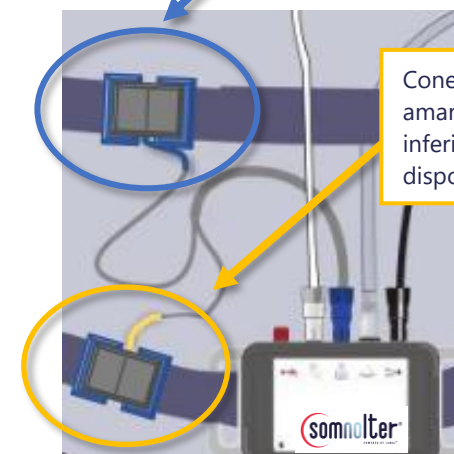

Los dos cinturones deben ajustarse bien al cuerpo, pero sin estar demasiado apretadas. Debe poder respirar libremente.

Instalación de la cánula nasal

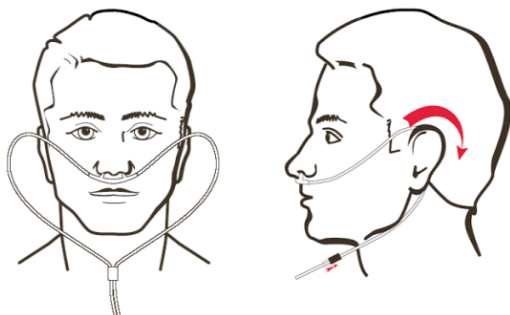

Introduzca las cánulas en las fosas nasales.

Pase el tubo alrededor de las orejas y luego por debajo de la barbilla.

Mueva el tubo de fijación por debajo de la barbilla para apretarlo.

Si es necesario, la cánula también puede fijarse con cintas adhesivas adicionales.

Instalación del sensor de oximetría

Coloque el sensor de pulso en el dedo índice tal y como se describe en las instrucciones de uso (en función del tipo de sensor utilizado).



Cuando el oxímetro está conectado, una luz roja ilumina la punta del dedo.

¡No use esmalte de uñas en ese dedo!

Instalación del dispositivo

Pase el cinturón abdominal por las ranuras del dispositivo. Instale el dispositivo en el vientre (sobre una camiseta o un pijama) ajustando el cinturón cómodamente.

Conexión de los sensores

Asegúrese de alinear la ranura del conector del sensor con el reborde de la entrada del dispositivo antes de insertarlo. No lo fuerce.

A continuación, se muestran todos los pictogramas correspondientes a cada uno de los sensores:



Conecte el sensor de oximetría a la entrada blanca del dispositivo, ilustrada por este pictograma.



Conecte el conector azul de ambas bandas a la entrada azul del dispositivo, ilustrada por este pictograma.



Enrosque la cánula nasal al conector ilustrado por este pictograma.



Conecte el Jawac a la entrada negra del dispositivo, ilustrada por este pictograma.



El conector rojo se utiliza para conectar un sensor auxiliar. Consulte el manual del sensor para su instalación.

Según la configuración aplicada por su médico, la grabación comienza al conectar el sensor de descenso mandibular o a la hora programada.

La luz verde parpadea regularmente para indicar que la grabación está en curso.

No desconecte el sensor mientras se esté realizando una grabación.

Por la mañana, al despertarse

Dependiendo de la configuración, la grabación se detiene al desconectar el sensor de caída mandibular o a la hora programada.

- Desconecte el conector negro del sensor de distancia (Jawac) y libere las sondas.
 - Despegue con cuidado el velcro para retirar las sondas sin tirar de los cables.
 - Retire el adhesivo de la cara.
- Desconecte el conector de la cánula nasal.
- Desconecte el sensor auxiliar y el oxímetro
- Lleve de vuelta el equipo a su médico.



Nomics
Rue des Chasseurs
Ardennais 4
4031 Angleur (Bélgica)
support@nomiscare.com

