

Somnolter

Notice Patient




Cette notice est destinée à aider le patient. Pour obtenir des informations sur les limitations, les contre-indications, les précautions et les avertissements liés au Somnolter, veuillez consulter votre médecin.

Vous pouvez regarder les instructions en vidéo ici :




SOMNOLTER est un enregistreur portable du sommeil simple d'utilisation. Vous pouvez aisément mettre l'appareil en place vous-même en respectant les consignes suivantes.

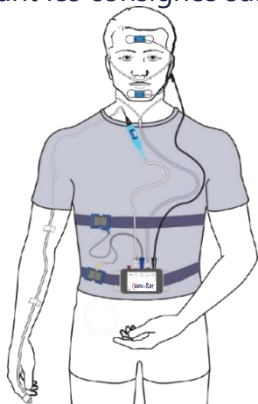


Mise en place du capteur « Jawac »

Placez chacune des 2 sondes sur le velcro d'un adhésif NS910 (JawaGrip) et fixer les sondes à l'aide du velcro :

1. Fixez la sonde en refermant les velcros.

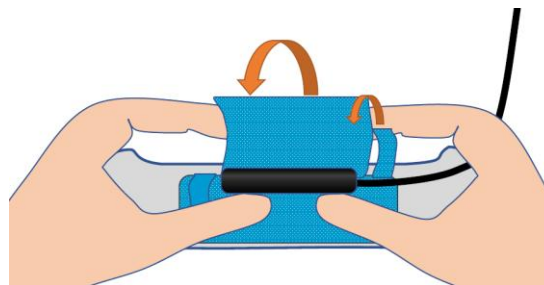

2. Utilisez une des parties latérales des velcros pour immobiliser le câble.

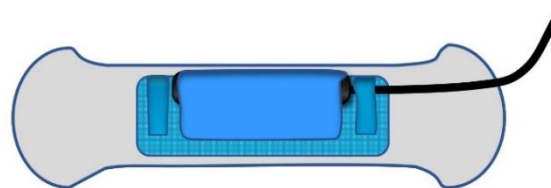


Collez les adhésifs sur le front et le menton selon les consignes suivantes :

Veillez à bien positionner les fils de manière à ce qu'ils repassent derrière la même oreille et ajustez-les en resserrant la tubulure prévue autour des câbles.

Les 2 sondes doivent être dans le même axe vertical et les câbles dirigés du même côté.


Vérifiez que les sondes sont bien collées sur le visage et qu'elles ne peuvent pas bouger ni pivoter.

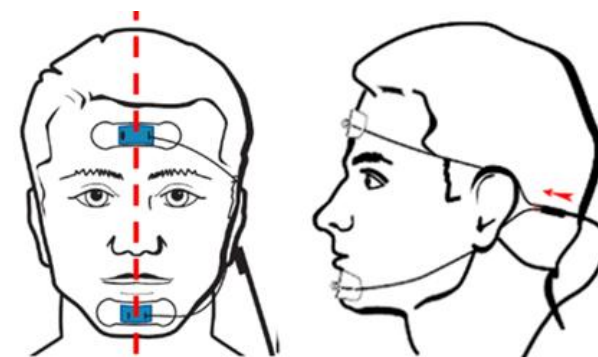

Mise en place des bandes inductives

Attachez la connectique avec câble bleu sur la ceinture supérieure sur la poitrine.

Attachez la connectique avec câble jaune sur la ceinture inférieure près de l'appareil.

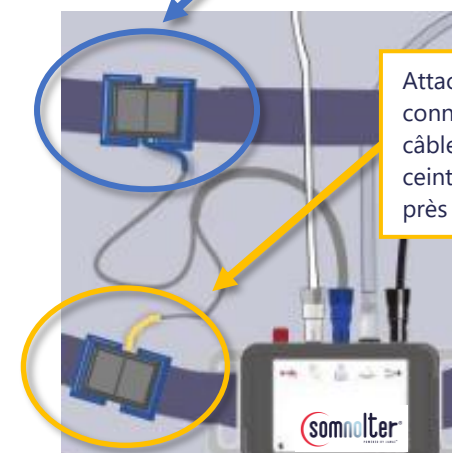


Les ceintures doivent être ajustées au corps mais ne pas trop serrer. Vous devez pouvoir respirer librement.

Mise en place des canules nasales

Insérez les deux petits embouts de la canule nasale dans les narines.

Faites courir la tubulure de la canule par-dessus les oreilles et sous le menton.

Glissez la tubulure de serrage vers le cou pour que l'ensemble tienne confortablement et fixez la canule en position si nécessaire à l'aide de sparadrap.

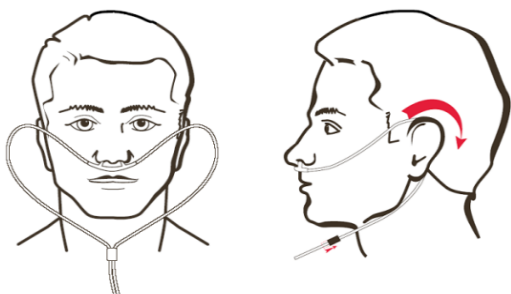

Si nécessaire, utilisez du sparadrap pour fixer la canule sur le visage, les embouts doivent rester toute la nuit dans les narines.

Mise en place de l'oxymètre

Fixez le capteur de pouls à l'index comme indiqué dans la notice d'utilisation (selon le type de capteur utilisé).



En fonctionnement, l'oxymètre émet une lumière rouge.

Pas de vernis à ongle coloré sur ce doigt !

Mise en place de l'enregistreur

Faites passer la ceinture abdominale dans les fentes de l'appareil. Installez l'appareil sur le ventre (par-dessus un T-shirt ou une chemise de pyjama).

Branchement des capteurs

Alignez bien l'encoche du connecteur des capteurs avec la crête sur le connecteur de l'appareil avant d'enfoncer. Ne pas forcer.

Respecter les pictogrammes ci-dessous pour chacun des capteurs.



Branchez le module d'oxymétrie au connecteur blanc illustré par le pictogramme ci-contre.



Branchez le connecteur bleu des deux ceintures au connecteur bleu illustré par le pictogramme ci-contre.



Vissez la canule nasale à l'appareil au connecteur illustré par le pictogramme ci-contre.

Branchez le connecteur noir du capteur Jawac sur le connecteur noir de l'appareil, illustré par le pictogramme ci-contre.



Le connecteur rouge permet le branchement d'un capteur auxiliaire. Se référer à la notice du capteur pour l'installation.

Suivant la configuration appliquée par votre médecin, l'enregistrement démarre au branchement du capteur d'abaissement mandibulaire, ou à une heure programmée.

Le témoin lumineux vert clignote lorsque l'enregistrement est en cours.

Ne pas débrancher les capteurs pendant toute la durée de l'enregistrement.

Le matin, au réveil

Suivant la configuration de l'appareil, l'enregistrement arrête au débranchement du capteur Jawac ou à une heure programmée.

Débranchez les capteurs de l'appareil un à un :

- Débranchez le connecteur du capteur noir (Jawac) et libérez les sondes :
 - Détachez délicatement le velcro pour retirer les sondes sans tirer sur les câbles.
 - Retirez les adhésifs du visage.
- Dévissez le connecteur de la canule nasale.
- Débranchez le capteur auxiliaire et l'oxymètre.
- Rapportez l'équipement à votre médecin.



Nomics

Rue des Chasseurs

Ardennais 4

4031 Angleur (Belgium)

support@nomicscare.com

