

Somnolter

Patiëntenbijsluiter




Deze bijsluiter is bedoeld om de patiënt te helpen. Voor informatie over de beperkingen, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen met betrekking tot Somnolter, raadpleeg uw arts.

U kunt de video-instructies hier bekijken:




SOMNOLTER is een gebruiksvriendelijke en draagbare slaapmonitor. U kunt het toestel gemakkelijk zelf installeren door de hier gegeven instructies te volgen.

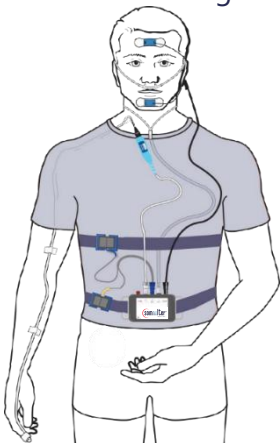


Installatie van de Jawac sensor

Plaats elk van de 2 sondes op het velcrostuk van een JawaGrip (NS910) en bevestig ze als volgt:

1. Sluit de velcro rondom de sondes.

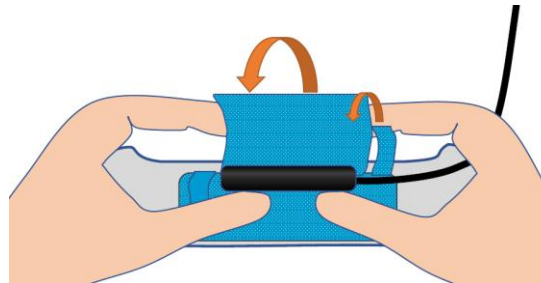


2. Gebruik één kant van de kleine klittenband om de kabel vast te maken.

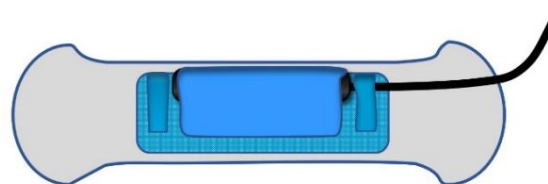

Bevestig het geheel horizontaal op het voorhoofd en de kin volgens de volgende instructies:

Beide sondes komen op dezelfde verticale as te staan en de kabels moeten aan dezelfde kant komen. Zorg ervoor dat de sondes goed vastzitten aan uw gezicht en niet kunnen bewegen of draaien.


Leid beide kabels achter hetzelfde oor en stel ze af door het slangetje rond de kabels aan te trekken.

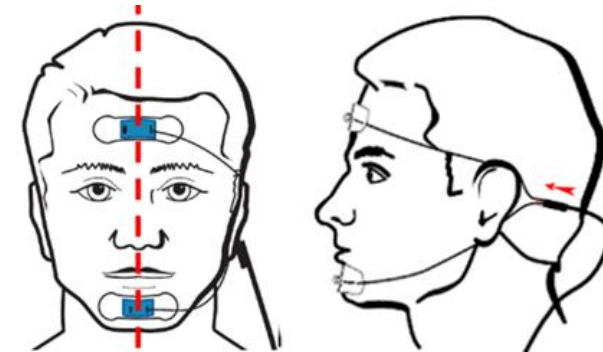

Installatie van de inductieve riemen


Verbind de blauwe connector met de bovenste riem ter hoogte van de borst.

Bevestig de gele kabelconnector aan de onderste riem, in de buurt van het apparaat.

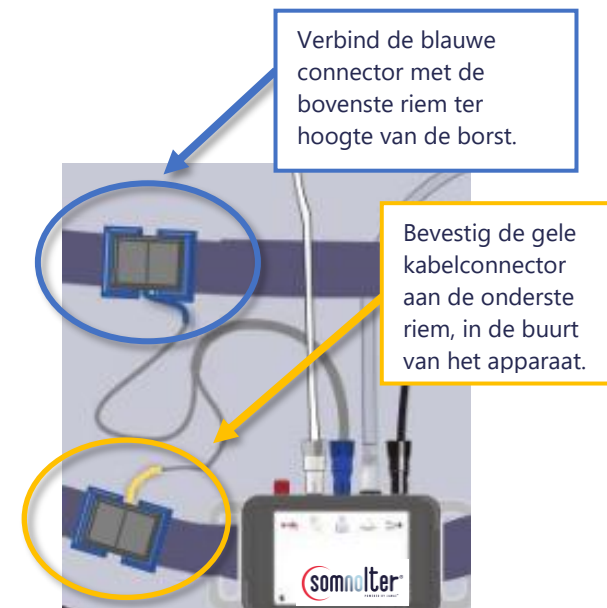

De twee riemen moeten stevig om het lichaam zitten, maar niet te strak. U moet vrij kunnen ademen.

Installatie van de neuscanule

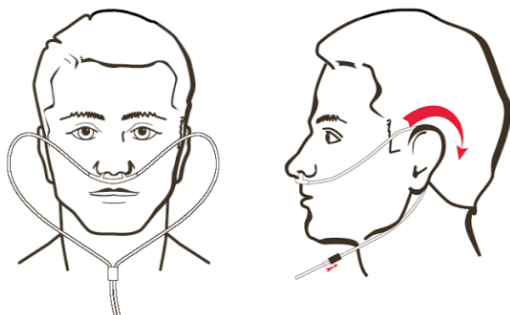

Steek de 2 uitsteeksels van de neuscanule in de in de neusgaten - eentje links en eentje rechts.

Lus de slang rond uw oren en dan onder de kin door. Beweeg het schuifriempje omhoog onder de kin om hem vast te zetten.

Indien nodig kan de canule ook worden vastgezet met extra plakband.

Installatie van de oximetrie-sensor

Volg de gebruiksaanwijzing van de sensor om deze aan de vinger te bevestigen (afhankelijk van het type sensor dat wordt gebruikt).



Wanneer de oximeter is aangesloten, verlicht een rood licht uw vingertop.

Let erop dat u geen nagellak op deze vinger heeft!

Installatie van het toestel

Haal de riem met klittenband door de sleuven in het toestel. Plaats het toestel op uw buik (over een T-shirt of pyjama heen).

Sensoren aansluiting

Zorg ervoor dat u de inkeping in de connector van de sensor mooi overeenstemt met die van de aansluiting voordat u deze indrukt. Niet forceren.

Bekijk de onderstaande pictogrammen voor elk van de sensoren.



Sluit de oximetrie-sensor aan op de witte aansluiting van het toestel, afgebeeld door het pictogram hiernaast.



Sluit de blauwe sensor van de twee riemen aan op de blauwe connector van het apparaat, aangeduid door het pictogram hiernaast.



Schroef de neuscanule op de connector die wordt aangeduid door het pictogram hiernaast.



Sluit de Jawac-sensor aan op de zwarte aansluiting van het toestel, die is afgebeeld met het pictogram hiernaast.



De rode connector wordt gebruikt om een hulpsensor aan te sluiten. Raadpleeg de handleiding van de sensor voor de installatie.

Afhankelijk van de configuratie die door uw arts is ingesteld, start de opname bij het aansluiten van de onderkaakbewegingssensor, of op een gepland tijdstip.

Het groene lampje knippert regelmatig om aan te geven dat de opname bezig is.

Koppel de sensor niet los gedurende de opname.

In de ochtend, bij wakker worden

Afhankelijk van de configuratie stopt de opname bij het loskoppelen van de onderkaakbewegingssensor, of op een gepland tijdstip.

- Koppel de zwarte afstandssensor (Jawac) los en maak de sondes los.
 - Maak de klittenband voorzichtig los om de sondes te verwijderen, zonder aan de kabels te trekken.
 - Verwijder de plakkers van uw gezicht.
- Schroef de connector van de neuscanule los.
- Koppel de hulpsensor en de oximeter los.
- Breng de apparatuur terug naar uw arts.



Nomics

Rue des Chasseurs

Ardennais 4

4031 Angleur (België)

support@nomicscare.com

